

Monster - Gebruiksaanwijzing voor Secosol® op maat gemaakte inlegzolen/schoenaanpassingen voor PBM-schoenen

Geachte klant,

Vandaag heeft u de speciaal gemaakte en geteste inlegzolen/schoenaanpassingen voor PBM-schoenen ontvangen. Om zonder problemen te kunnen stappen, dient u de volgende instructies voor gebruik en verzorging in acht te nemen:

- 1) Draag de inlegzolen altijd in combinatie met sokken. Draag uw inlegzolen/geprepareerde schoenen voorlopig de komende 8-10 dagen alleen per uur en verleng de draagtijd van dag tot dag. Gebruik de op maat gemaakte inlegzolen alleen in de veiligheidsschoenen die ermee zijn getest.
- 2) Haal de inlegzolen regelmatig uit uw schoenen om ze te luchten. Om schoon te maken, volstaat om ze af te wassen met een vochtige doek. Verontreinigingen op geprepareerde veiligheidsschoenen niet met agressieve reinigingsmiddelen behandelen. Droog nooit inlegzolen of schoenen die vochtig zijn geworden aan de verwarming of andere warmtebronnen.
- 3) Veiligheidsschoenen met een gewijzigde zoolstructuur mogen alleen worden gebruikt bij temperaturen tot 60 °C.
- 4) De fabricagedatum van de inlegzolen vindt u op het label op de inlegzool (zie voorbeeld punt 9). De draagtijd van de inlegzolen is minimaal zes maanden, afhankelijk van de belasting.
- 5) De verwijdering aan het einde van de levenscyclus van de PBM vindt plaats in overeenstemming met de landspecifieke wettelijke vereisten
- 6) Het meegeleverde hulpmiddel is een op maat gemaakt product in de zin van de verordening betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) EU 2016/425 en voldoet aan de eisen van bijlage I van de EG-richtlijnen 93/42/EEG. Het mag alleen worden gebruikt door de persoon voor wie het is gemaakt
- 7) als de gebruiker alle risico's in acht neemt en onjuist gebruik van de inlegzool vermijdt, kan er worden aangenomen dat de geavanceerde technologie een veilig product is. Het in gevaar brengen van de gezondheid en veiligheid van derden kan worden uitgesloten. Misbruik zoals: opzettelijke vernieling, het dragen van de individueel vervaardigde inlegzool door een andere persoon of het dragen van de inlegzool in een niet-gecertificeerde PBM-schoen kan de bescherming verminderen.
- 8) De test van wijzigingen aan de veiligheidsschoenen werd uitgevoerd door een aangemeld testcentrum. De modellen die gecertificeerd zijn met het Secosol® orthopedische inlegzoolstelsel zijn te vinden in het downloadgedeelte www.insole-world.com

QMF-Nr.: 8.6-2/1 Stand: 10/2021

- 9) De distributeur markeert de inlegzolen in overeenstemming met de European Verordening inzake medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 (MDR).

Weergave (voorbeeld)



Weergave voorbeeld Complete+:



Weergave voorbeeld Verpakking Complete+:



De cijfers 4-9 van het batchnummer P3D2107223348 geven een indicatie van de productiedatum. In dit voorbeeld is de datum: 22 juli 2021.

:

- 10) De labels op de schoenen geven informatie over:
 Fabrikant en CE-markering
 Typeaanduiding, artikelnummer, maatspecificatie
 Symbool voor veiligheidskenmerk, fabricagedatum
 De toegepaste norm

Voor verdere instructies voor gebruik en onderhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde gebruiksaanwijzing van de schoenenfabrikant.

QMF-Nr.: 8.6-2/1 Stand: 10/2021